

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Pipi NITOLIC® Szampon

Warunkiem skutecznej terapii, niezbędne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji oraz używanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed użyciem wyrobu zapoznaj się z instrukcją. Zachowaj instrukcję, aby móc ponownie zapoznać się z jej treścią.



SPIS TREŚCI

1. ZASTOSOWANIE

2. DZIAŁANIE WYROBU

3. SKŁAD

4. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

5. SPOSÓB UŻYCIA

6. PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA
7. OSTRZEŻENIA

8. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

9. PRZECHOWYWANIE

10. USUWANIE ODPADÓW

11. OBJAŚNIENIE SYMBOLI

12. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. ZASTOSOWANIE:

Pipi NITOLIC® Szampon jest wyrobem medycznym przeznaczonym do stosowania w leczeniu wszawicy wywołanej przez wesz głowową (*Pediculus humanus capitis*). Wyrób przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Pipi NITOLIC® Szampon wystarcza na:

- 3 x włosy długie
lub
5 x włosy średniej długości
lub
9 x włosy krótkie

Rekomendowana ilość Pipi NITOLIC® Szampon do wykonania zabiegu to: ok. 50 ml dla włosów długich, ok. 30 ml dla włosów średniej długości oraz ok. 20 ml dla włosów krótkich.

Powyższe ilości są wyłącznie orientacyjne. Podczas nakładania produktu należy upewnić się, że preparat dokładnie pokrył skórę głowy oraz całą powierzchnię włosów.

2. DZIAŁANIE WYROBU:

- likwiduje aktywne stadia rozwojowe wszy
- likwiduje jaja wszy (gnidy)
- ułatwia usunięcie z włosów martwych wszy i gnid po przeprowadzonej kuracji

Działanie Pipi NITOLIC® Szampon polega na zastosowaniu technologii o-effect®. Wyrób szybko i dokładnie pokrywa wszy oraz gnidy, blokując dostęp powietrza do aparatu oddechowego, co powoduje ich skuteczną eliminację.

3. SKŁAD:

Isopropyl myristate, Cyclopentasiloxane, Propylene Glycol Laurate, MIPA-Lauryl sulfate, Propylene glycol.

4. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1



Pipi NITOLIC® Szampon 180 ml

Szampon do eliminacji wszy i gnid

2



NITOLIC® grzebień

Grzebień do usuwania martwych wszy i gnid

3



2x Czepek ochronny

Czepek, który zabezpiecza i utrzymuje włosy oraz zwiększa skuteczność kuracji

5. SPOSÓB UŻYCIA:

Ważne!

Przeprowadź kurację u wszystkich osób z bliskiego otoczenia osoby zarażonej, które mogły mieć kontakt z pasożytami.

Wszawicą łatwo można się zarazić, dlatego jednocześnie leczenie zarówno osoby zarażonej, jak osób w jej otoczeniu jest kluczowe, aby uniknąć powtórnej infekcji.



1

Przygotuj preparat do użycia.



Umieść aplikator na buteleczce i dokładnie dokręć.



Odkręć nasadkę aplikatora.

Aplikator może występować w różnych kolorach, np. białym lub różowym, co nie wpływa na skuteczność i bezpieczeństwo wyrobu medycznego.

2

Jeśli włosy są dłuższe, rozdziel je na kilka mniejszych sekcji.



3

Nanieś równomiernie **Pipi NITOLIC® Szampon** na suche włosy, od nasady aż po same końce, szczególną uwagę zwracając na miejsca za uszami i z tyłu głowy.



4

Starannie wmasuj wyrób, by dokładnie pokrył włosy oraz skórę głowy, wraz z obecnymi w nich pasożytami.



5

Natóż na głowę czepek ochronny i pozostaw na **15 minut**.

15min



6

Po upływie czasu zdejmij czepek, nanieś niewielką ilość wody na włosy i skórę głowy, **rozmasuj w celu wytworzenia piany**.



7

Następnie dokładnie spłucz szampon z włosów. W razie potrzeby umyj włosy przy użyciu zwykłego szamponu. By ułatwić ich rozczesanie, możesz zastosować odżywkę do włosów.



8

Następnie, przy pomocy **grzebienia NITOLIC®**, usuń starannie wszy oraz gnidy z włosów. Wyczesz każde pasmo, zaczynając od skóry głowy, aż po końcówki. Wyczesane pasmo przekładaj na bok. Martwe wszy i gnidy usuwaj z grzebienia za pomocą papierowej chusteczki.



Po 7-10 dniach przeprowadź kontrolę włosów oraz skóry głowy, by upewnić się, że wszystkie wszy i gnidy zostały skutecznie wyeliminowane. W razie konieczności powtórz zabieg z użyciem Pipi NITOLIC® Szampon.

6. PRZECIWWSKAZANIA
DO STOSOWANIA:

Nie stosować wyrobu u dzieci poniżej drugiego roku życia, na uszkodzoną skórę głowy oraz w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik wyrobu. Bezwzględnie unikać kontaktu z oczami, błonami śluzowymi ust i nosa. Przed zastosowaniem preparatu u dzieci poniżej drugiego roku życia, kobiet w ciąży oraz w trakcie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności oraz w przypadku uszkodzenia opakowania.

7. OSTRZEŻENIA:

- Wyrób przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego, do aplikacji na nieuszkodzoną skórę głowy. Przed pierwszym zastosowaniem zaleca się sprawdzić możliwość działania uczulającego: niewielką ilość Pipi NITOLIC® Szampon nanieść na skórę dłoni lub przedramienia i obserwować, czy nie wystąpią reakcje niepożądane.
- W przypadku kontaktu z oczami lub błoną śluzową należy natychmiast przemyć te miejsca dużą ilością letniej wody przez 10–15 minut. Jeśli podrażnienie nie ustąpi po upływie 15 minut, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas aplikacji wyrobu, aby nie dopuścić do rozlania płynu.
- Aplikację wyrobu u dzieci może przeprowadzić wyłącznie osoba dorosła.
- W sytuacji przypadkowego połknięcia wyrobu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Produkt należy aplikować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

8. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Wyrób może powodować miejscowe podrażnienie skóry. W razie wystąpienia działania niepożądanego należy natychmiast zaprzestać stosowania wyrobu i skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia incydentu medycznego związanego z wyrobem, należy zgłosić go producentowi i właściwemu organowi (Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).

9. PRZECHOWYWANIE

Wyrób należy przechowywać w suchym, nienasłonecznionym miejscu, w temperaturze od 5°C do 40°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w miejscu niedostępnym dla dzieci.

10. USUWANIE ODPADÓW

Produkt należy usuwać do odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Puste opakowanie nadaje się do recyklingu.

11. OBJAŚNIENIE SYMBOLI

 Producent wyrobu medycznego	 Numer partii wyrobu medycznego	 Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone	 Unikalny identyfikator wyrobu
 Wyrób medyczny	 Data ważności	 Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją używania	 Chronić przed światłem
 Znak CE potwierdzający zgodność z wymaganiami UE dla wyrobów medycznych	 Limity temperatury	 Zachować ostrożność podczas obsługi wyrobu	 Chronić przed wilgocią
			 Numer identyfikacyjny produktu

12. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

- 1. Dlaczego osoby z otoczenia osoby zarażonej wszawicą również powinny poddać się leczeniu?**
Ze względu na łatwość zarażenia wszawicą, ważne jest, aby wszystkie osoby z otoczenia zarażonej oraz te, które miały z nią kontakt, przeszły leczenie. Zapobiega to rozprzestrzenianiu infekcji.
- 2. Czy mogę ponownie użyć Pipi NITOLIC® szampon w przypadku ponownego zarażenia wszawicą, np. następnego dnia?**
Tak, można ponownie zastosować Pipi NITOLIC® szampon. Wyrób jest bezpieczny, nietoksyczny i oparty na fizycznym sposobie działania.
- 3. Czy po zabiegu gnidzy mogą wydawać dźwięki podczas zgniatania?**
Tak, jest to możliwe, ponieważ proces dehydratacji (odwodnienia) sprawia, że gnidzy zgniatane palcami mogą "strzelać".

- 4. Czy normalne jest odczuwanie swędzenia skóry głowy po zabiegu?**
Tak, swędzenie skóry głowy może być spowodowane reakcją alergiczną na ślinę wszy i może utrzymywać się przez kilka dni. W tym czasie warto stosować łagodzące i nawilżające szampony do pielęgnacji podrażnionej skóry głowy.
- 5. Czy wszy i gnidzy mogą przeżyć poza głową?**
Tak, wszy mogą przeżyć około 48 godzin, a gnidzy nawet kilka dni poza głową. Ważne jest dokładne oczyszczenie tkanin i otoczenia, w tym mebli i podłóg, z którymi miała kontakt osoba zarażona.
- 6. Czy moje dziecko może wrócić do szkoły lub przedszkola po wyleczeniu wszawicy?**
Tak, jednak aby zapewnić mu bezpieczeństwo, zalecamy stosowanie produktów prewencyjnych, takich jak Pipi NITOLIC® prevent plus który chroni przed ponownym zarażeniem wszawicą.



Zapobiegaj ponownemu zarażeniu



Pipi NITOLIC® prevent plus

Spray do ochrony przed wszawicą z naturalnymi składnikami, delikatny dla skóry głowy i włosów, zalecany do codziennego użytku, szczególnie przed wyjściem do szkoły lub przedszkola.

Skorzystaj z

25%

rabatu



skanuj i skorzystaj z rabatu

Otrzymaj rabat na preparaty do ochrony przed wszawicą w e-sklepie. Wystarczy wejść na adres www.sklep.icbpharma.pl i użyć kodu:

prevent25

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Dowiedz się więcej
o produktach i odwiedź

www.nitolic.pl

bezpłatna infolinia:
800 153 154

e-mail:
info@icbpharma.com